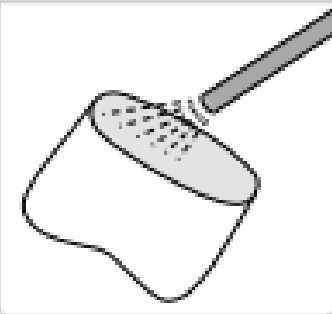
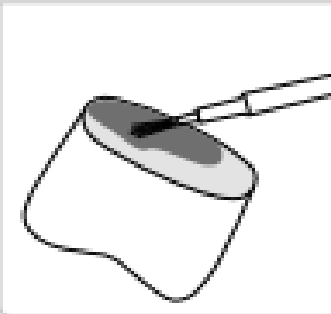
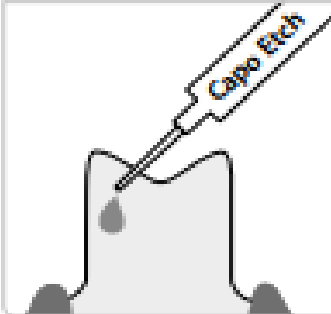
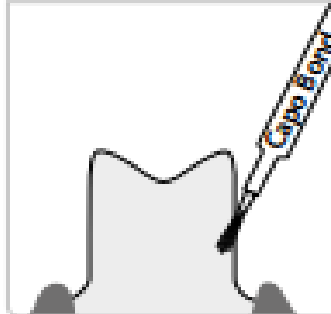
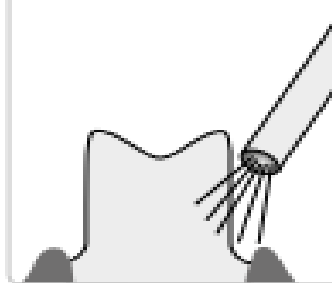
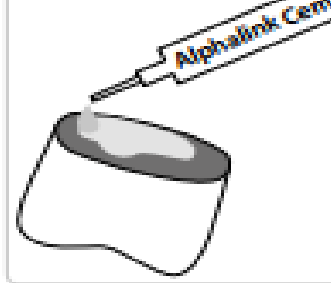
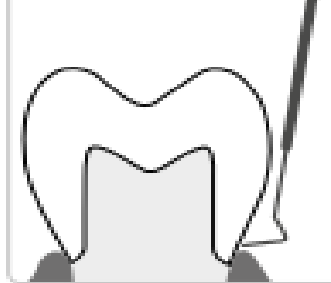
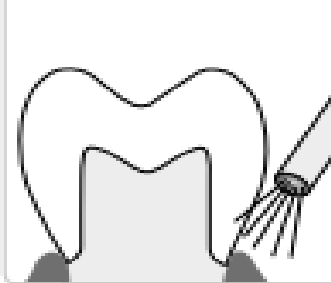


Gebruiksaanwijzing Alphaslink Cem

De 8 stappen van Alphaslink Cem voor een permanente bevestiging van Zirkonium-dioxide, Glaskeramiek, Composit, EM, NEM en Titanium.

 <p>1</p>	 <p>2</p>	 <p>3</p>	 <p>4</p>
<p>Schoon sprayen en grondig drogen van het werkstuk.</p>	<p>Verdeel Sebond Universal gelijkmatig en gedurende 1 minuut laten uitdrogen.</p>	<p>Verdeel Capo Etch op het te restaureren oppervlak. Etsen glazuur gedurende 30 sec. en/of dentine gedurende 15 sec.. Vervolgens goed naspoeien met water.</p>	<p>Natte ondergrond met Capo Bond. Vervolgens droog voorzichtig met perslucht circa 15 sec.. Herhaal de procedure tweemaal.</p>
 <p>5</p>	 <p>6</p>	 <p>7</p>	 <p>8</p>
<p>Uitharden Capo Bond met een polymerisatielamp voor 2 x 20 seconden.</p>	<p>Gelijkmatig verspreiden van de Alphaslink Cem over het werkstuk.</p>	<p>Plaats het werkstuk met lichte druk en verwijder overtollig materiaal.</p>	<p>Uitharden rand met een polymerisatielamp voor 20 sec. Chemische polymerisatie compleet na 6 min.</p>